

elma clean 40 (EC 40)

ZAHNZEMENTENTFERNER

WÄSSRIGES SAURES REINIGUNGSKONZENTRAT

Beschreibung

Das Reinigungskonzentrat entfernt wirkungsvoll und schnell Zemente von Kronen, Brücken, zahnärztlichen und medizinischen Instrumenten aus Edelstahl, Keramik, Kunststoff, Glas, Gummi.

Löst Zahnzemente einschl. Phosphatzemente, Metalloxid, Kalk und Flussmittel ab. Nicht geeignet für Leichtmetalle (z.B. Al, Mg, Zn und Leichtmetall-Legierungen).

Anwendung und Dosierung

Dosierung: 5 - 10%ig (entspricht 50 – 100 ml *elma clean 40 (EC 40)* auf 1 Liter Lösung mit Stadtwasser). Reinigungszeit im Ultraschallbad bei Raumtemperatur: 5 - 10 Minuten. Danach gründlich unter fließendem Wasser abspülen.

Hotline Anwendungsberatung

Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Das Konzentrat ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV als Ätzend (C, R34) eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit den Reinigungschemikalien um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 1182 g/l, pH (Konzentrat): 0,6 im Lieferzustand.

Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: 15-30% Phosphorsäure.

Entsorgung des Reinigungsbades

Das Reinigungsbad kann nach Gebrauch entsprechend den örtlichen pH-Grenzwerten in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zuläßt. Konzentrat vorher neutralisieren.

Neutralisationsempfehlung: Mit Kalk oder mit Natronlauge neutralisieren.

Abfallschlüssel: 20 01 14*; „Säuren“.

Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 1l, 2,5l, 10l und 25l.

Nicht zusammen mit Laugen lagern. Säurebeständigen Fußboden vorsehen. Nur im geschlossenen Originalbehälter oberhalb -5°C, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Trocken lagern.

5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist Gefahrgut (Klasse 8, UN 1805) gemäß GGv für alle Transportarten.

Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG

Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-ultrasonic.com

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0

Fax: ++49 (0) 7731 882-266

www.elma-ultrasonic.com

26.04.12/ P:\Produkte\PROInfo\Produkte\deutsch\word_D\IP_EC 40_D.doc

