

# STAMMOPUR AG

## Gips- und Alginat-Entferner

Für Instrumente und Geräte im Dentalbereich  
für Ultraschall



### Auf einen Blick

- Gebrauchsfertig
- Entfernt Gipse und Alginat
- Sehr hohe Materialverträglichkeit
- Für alle Materialien, auch für Leichtmetalle geeignet
- Auch ohne Ultraschall wirksam anwendbar, für z.B.: Gips-Anmischbecher, Vakuum-Anrührgeräte
- Mild-alkalisch
- Biologisch abbaubar

### Allgemeines

STAMMOPUR AG ist ein mild-alkalischer Reiniger speziell für die Entfernung von Gipsen, Alginaten und Einbettmassen im Dentalbereich. STAMMOPUR AG ermöglicht kurze Ultraschall-Reinigungszeiten und schont somit besonders empfindliche Instrumente.

### Materialverträglichkeit

STAMMOPUR AG besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und ist geeignet für Materialien aus Metall (auch Leichtmetall), Glas, Porzellan und Kunststoff.

### Anwendung

**Reinigung  
im Ultraschallbad  
3 - 10 Minuten unverdünnt  
20 - 60 °C**

Reinigung  
ohne Ultraschall im Tauchverfahren  
15 -120 Minuten unverdünnt  
20 - 60 °C

Einwirkzeit je nach Art und  
Hartnäckigkeit der Verschmutzung

Nach der Aufbereitung Teile **sofort** sorgfältig mit Wasser spülen.

### Anwendungshinweise

Auf die vollständige Benetzung der Instrumentenoberflächen ist zu achten. Einige Abdruck- und Einbettmassen werden nur angelöst und können unter dem Wasserstrahl entfernt werden. Bei der Anwendung im Ultraschallgerät sind die Hinweise des Geräteherstellers zu beachten.

### Sicherheitshinweise

STAMMOPUR AG ist gemäß Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig. Die Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Reinigungschemikalien sind zu beachten. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht einnehmen.

### Entsorgung

Die verwendete Gebrauchslösung kann mit der 4fachen Menge Wasser verdünnt in die Kanalisation gegeben werden.

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.

### Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare, hellgelbe Flüssigkeit  
Dichte (20 °C): 1,20 g/ml  
Temperaturstabilität: -18 bis 80 °C  
pH-Wert: 8,0

### Zusammensetzung

STAMMOPUR AG enthält: <5 % amphothere Tenside, Zitronensäure, Komplexbildner, Carbonate.

UBA 19510003

### Lieferformen / Dosierhilfen

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1 Liter PE-Flasche        | Best.-Nr. 905 |
| 2 Liter PE-Henkel-Flasche | Best.-Nr. 825 |
| 5 Liter PE-Kanister       | Best.-Nr. 906 |
| 25 Liter PE-Kanister      | Best.-Nr. 907 |

Dosierpumpe für 5- und 25-Liter-Kanister  
Dosierhahn für 25-Liter-Kanister

EG-Sicherheitsdatenblatt als PDF-Download im Internet: [www.dr-stamm.de](http://www.dr-stamm.de)

Die Angaben sollen unverbindlich beraten und verstehen sich unter Vorbehalt eventueller Änderungen der Zusammensetzung sowie rechtlicher und sonstiger Sicherheitsvorschriften.

**DR·H·STAMM GmbH** Chemische Fabrik

Heinrichstr. 3-4 · D-12207 Berlin

Tel. 030-768 80 250 · Fax 030-773 46 99