

STAMMOPUR DB

Bohrer-Desinfektion und Reinigung

Für zahnärztliche, rotierende Kleininstrumente

DGHM-zertifiziert

CE 0124

Auf einen Blick

- Gebrauchsfertig
- Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang
- Kurzzeit-Desinfektion mit Ultraschall
- Hohe Materialverträglichkeit
- Mit Korrosionsschutz
- Aldehyd-, phenol- und chlorfrei
- Bakterizid, (inkl. Tb.-B.), fungizid, viruzid (HBV/HIV)

Allgemeines

STAMMOPUR DB ist speziell für die Desinfektion bei gleichzeitiger Reinigung im Ultraschall, aber auch als Bohrerbad zur Desinfektionsablage von zahnärztlichen, rotierenden Präzisionsinstrumenten wie Bohrer, Fräser, Diamantschleifer und Nervnadeln einzusetzen.

STAMMOPUR DB ermöglicht kurze Ultraschall-Behandlungszeiten und schont somit besonders empfindliche Instrumente.

Materialverträglichkeit

STAMMOPUR DB besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und ist geeignet für Materialien aus Metall, Glas, Porzellan und Kunststoff. Nicht für alkali- und alkoholempfindliche Materialien, Vorsicht bei Leichtmetallen.

Anwendung

**Desinfektion
im Ultraschallbad
5 Minuten unverdünnt**

Desinfektion
ohne Ultraschall
15 Minuten unverdünnt

Nach der Aufbereitung Teile an der Luft trocknen lassen, **nicht** mit Wasser spülen, damit der Korrosionsschutz wirkt.

Anwendungshinweise

STAMMOPUR DB inaktiviert innerhalb der angegebenen Einwirkzeiten auch HBV/HIV. Verschmutztes Instrumentarium wird durch STAMMOPUR DB schnell und zuverlässig **desinfiziert und gereinigt**. STAMMOPUR DB nur im Einsatzgefäß, z. B. Becherglas, verwenden.

Als Kontaktflüssigkeit im Ultraschallbad TICKOMED 1 oder STAMMOPUR DR 8 verwenden.

Bei der Anwendung im Ultraschallgerät sind die Hinweise des Geräteherstellers zu beachten.

Auf vollständige Benetzung der Instrumentenoberflächen achten. Hohlkörper so einlegen, dass die Luft aus den Hohlräumen vollständig entweicht. Die Zugabe von Reinigungsverstärkern ist nicht zulässig.

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die UVV "Gesundheitsdienst" schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Handschuhen vor.

STAMMOPUR DB nicht zusätzlich erwärmen. Unzugänglich für Kinder bei 5 – 30 °C aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Nicht einnehmen.

Entsorgung

Die verwendete Gebrauchslösung kann mit der 4fachen Menge Wasser verdünnt in die Kanalisation gegeben werden. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C): 0,96 g/ml
Temperaturstabilität: -15 bis 60 °C
pH-Wert: 13

Zusammensetzung

Wirkstoffe in 100 g: 30,0 g 2-Propanol, 0,1 g Didecyldimethylammoniumchlorid, <0,5 % Natriumhydroxid, Inhibitoren, organische Salze.

UBA 19510004

Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung,

Gefahrensymbol: Xi, Reizend.

Gutachten

Bakterien, Pilze: Prof. Dr. Gundermann, 06/94 und 04/98 Kiel;
Prof. Dr. Hartmann, 06/93 Berlin; Prof. Dr. Werner, 02/98 Schwerin;
Prof. Dr. Wille, 06/04 Gießen; HBV/HIV: Dr. Steinmann, 03/98 Bremen.
Ultraschall-Zeitverkürzung: Prof. Dr. Hartmann, 03/94 Berlin

Lieferformen / Dosierhilfen

1 Liter PE-Flasche Best.-Nr. 983
2 Liter PE-Henkel-Flasche Best.-Nr. 821
5 Liter PE-Kanister Best.-Nr. 984
25 Liter PE-Kanister Best.-Nr. 933

Dosierpumpe für 5- und 25-Liter-Kanister
Dosierhahn für 25-Liter-Kanister

EG-Sicherheitsdatenblatt als PDF-Download im Internet: www.dr-stamm.de

Die Angaben sollen unverbindlich beraten und verstehen sich unter Vorbehalt eventueller Änderungen der Zusammensetzung sowie rechtlicher und sonstiger Sicherheitsvorschriften.

DR·H·STAMM GmbH Chemische Fabrik

Heinrichstr. 3-4 · D-12207 Berlin

Tel. 030-768 80 250 · Fax 030-773 46 99